


开口处；③拿起注射器，使安瓿头部与注射部位接触，按下触发开关。

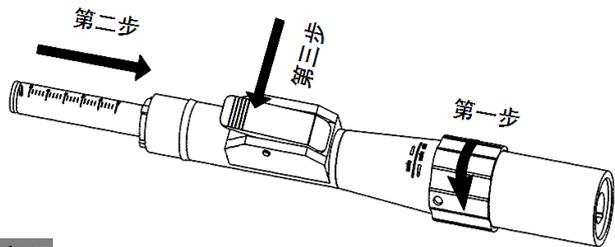

注意事项

- 1、在安瓿旋钮到注射器上时一定要旋到完全吻合直到牢固为止；
- 2、在无安瓿和安瓿中无药液的情况下，请勿空打；
- 3、转接头和安瓿在取出和使用时要注意无菌操作；
- 4、在注射时一定要垂直于皮肤注射；
- 5、在注射时压下脂肪厚度的 1/2；
- 6、注射完毕后在皮肤上停留 2—3 秒再离开注射部位；
- 7、注射时应拨开动物的毛再行注射；

注：注射后如果有小红点和轻微渗血是正常现象，用干棉签在注射部位按压一下即可，千万不要用手捏拉注射部位，否则会引起出血。


耗材的更换

1、安瓿的更换

安瓿一般使用不得超过 5 次，但若使用期间出现：（1）安瓿拉杆弯曲；（2）安瓿内胶皮塞老化，有药液残留；（3）安瓿瓶体爆裂（操作不当引起）等现象发生时，安瓿无论使用几次都必须更换。

ZAM 中安医疗器械

无针注射系统使用说明书

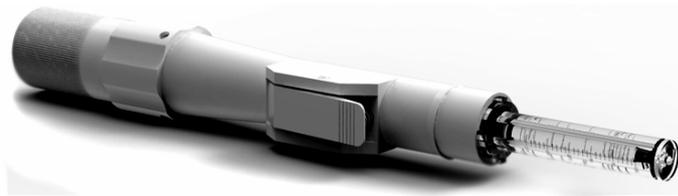

公司地址：江苏常州市武进区常武中路科教城 2 号楼 2517-2519

公司网址：www.zamedical.com

电话：0519-86339763

传真：0519-86339761

E-mail：zamedical@yahoo.cn

产品组成



安瓿两个



转接头一个



产品使用范围及参数

本产品可作为宠物医院专用注射器、家庭自备宠物注射器。主要适用于猫、狗、兔等一般宠物的药物以及疫苗射。


最大注射剂量为 0.3ml

最低注射剂量不得小于 0.1ml

产品优势


- 1、无针头，没有痛感且避免了交叉感染；
- 2、易于操作，剂量精确；
- 3、不会产生红肿、淤青以及溃烂等不良反应；
- 4、消除了废弃针头处理带来的费用。

结构图解

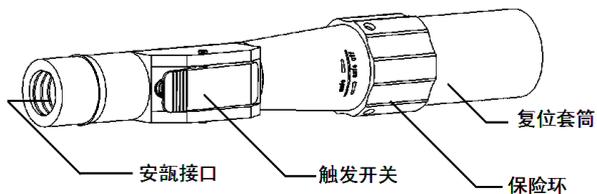


操作步骤

1、复位：第一步，顺时针旋转 60°；第二步，顺时针旋转复位套筒，当听到扳机“咔”的声响后，此时，尾部红色标志到达顶端，停止旋转复位套筒，如下图所示，此时推射器处于工作状态。

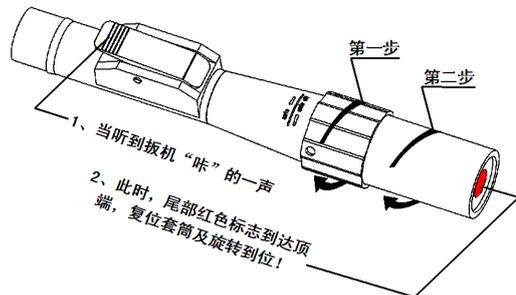

2、吸药：首先，将药瓶盖取下并插入瓶接口有针的一端；然后，将安瓿顺时针旋入转接头另一端。抽动安瓿活塞杆，抽取所需剂量的药液，如下图所示。

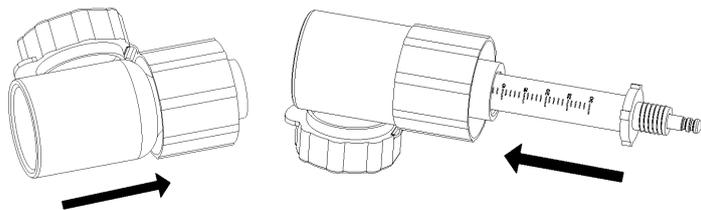

3、注射：①反向拨动保险环（逆时针），使之回到初始位置，这时注射器就处于准备状态(打开保险之前，逆时针旋一下复位套筒，会延长产品寿命，且会使得打开保险更为轻松)；②将安瓿从转接头上拧下，通过安瓿底端的螺纹，将安瓿固定在推射器的